


Всегда проверяйте: 1. **N** электрод
2. Соединение штекер (кнопка) — электрод!

Помехи

Помехи в отведениях	Электрод
I	R или L
II	R или F
V1...V6	C1...C6

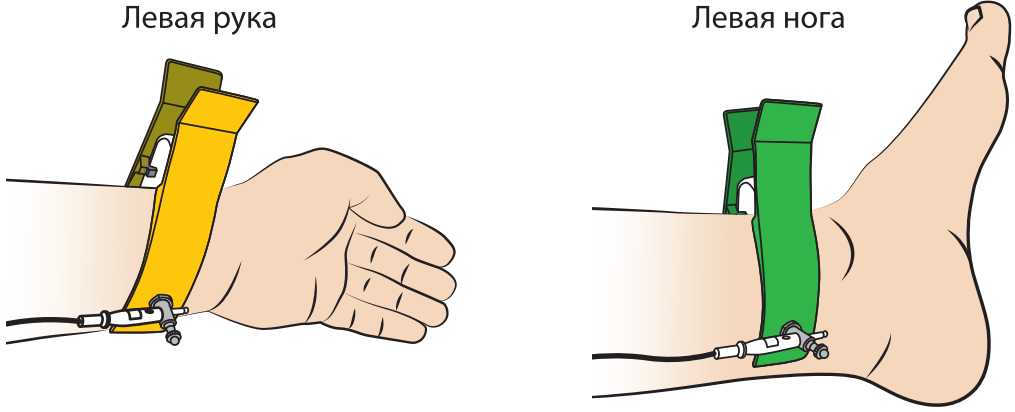

Что делать?



- Переустановить электрод



- Обеспечить пациенту удобное положение и попросить расслабиться
- При треморе конечностей - перенести **R L F N** на туловище (по Мейсону-Ликару, по Хану или схеме Лунд)
- Включить фильтр нижних частот с частотой среза 30...40 Гц



- Обеспечить неподвижность проводов и электродов
- Включить фильтр верхних частот 0,3...0,5 Гц



- Отвести пациента от розетки и удлинителя
- Провода (кабель) ЭКГ положить на пациента
- Перейти на питание от аккумулятора
- Включить режекторный фильтр 50 Гц

